

重要

「オロリン マルチセプトプラス」

新発売のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、発売以来ご愛顧いただいております器具用除菌剤 オロシド マルチセプトプラスですが、製造元での商品リニューアルに伴い、「オロリン マルチセプトプラス」として発売させて頂くこととなりました。

下記の通りご案内いたしますので、ご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 商品名 : オロリン マルチセプトプラス 2L
用途 : 一般器具、外科用器具、インプラント器具の除菌洗浄
主成分 : アルキルアミン、塩化ジアルキルジメチルアンモニウム
希釈率 : 50倍 (2%)
浸漬時間 : 15分 ※超音波洗浄器使用も同じ浸漬時間
交換時期 : 最長7日間 (推奨毎日)
特長 : アルデヒド、塩素フリーで従事者と器具に優しい処方です。
除菌と洗浄を同時に行うため作業工程の簡素化と感染リスクを低減できます。
作用範囲 : B型・C型肝炎ウイルス、HIVウイルス、MRSA、インフルエンザウイルス
一般細菌、結核菌、アデノウイルス、ノロウイルス、ポリオウイルスなど
製造元 : Oro Clean Chemie AG (スイス)
発売日 : 2019年3月1日

希望小売価格、内容量、容器に変更はございません。

以上

製品についてご不明な点は弊社、営業部までお問い合わせください。

佐藤歯材株式会社

問い合わせ番号 TEL : 03-3833-3986

※裏面もご覧ください

オロシド マルチセプトプラス から オロリン マルチセプトプラス の変更点

	変更前			変更後
商品名	オロシド マルチセプトプラス			オロリン マルチセプトプラス
容器				
医院価格	12,600円			12,600円
内容量	2L			2L
主成分	<ul style="list-style-type: none"> ・ディアルキルメチルポリアンモニウム ・プロピオネート ・アルキルアミン 			塩化ジアルキルジメチルアンモニウム <ul style="list-style-type: none"> ・アルキルアミン
希釈率	20倍(5%)	25倍(4%)	50倍(2%)	50倍(2%)
作用時間	15分	30分	60分	15分
超音波洗浄器	8分	15分	30分	15分
最長交換時期	7日間 推奨 / 2~3日			7日間 推奨 / 毎日交換^{※1} <small>※1 使用頻度、汚染度合いによる</small>
抗菌スペクトル	<ul style="list-style-type: none"> ・アデノウイルス(2%:60分) ・結核菌(5%:15分) ・B型肝炎ウイルス(4%:15分) ・C型肝炎ウイルス(0.5%:5分) ・HIVウイルス(4%:15分) ・インフルエンザウイルス ・一般細菌(0.25%:15分) 			ポリオウイルス ノロウイルス <ul style="list-style-type: none"> ・アデノウイルス ・結核菌 ・B型肝炎ウイルス ・C型肝炎ウイルス ・HIVウイルス ・インフルエンザウイルス ・一般細菌
製造元	オロクリーンケミAG(スイス)			オロクリーンケミAG(スイス)

商品名が変わります

一部成分が変わります

作用時間が早くなります

効果の幅が広がります

- ・医院価格、容器、内容量、製造元は変更はありません。
- ・超音波洗浄器を併用した場合も同じ作用時間となります。