

OROLIN®MULTISEPT Plus

オロリン マルチセプトプラス

用途

一般器具、外科用器具、インプラント器具などの除菌・洗浄

使用方法

汚染器具を水洗いせずに50倍(2%)希釈液に15分間浸漬してください。

浸漬後は十分に水洗いしてから滅菌してください。

希釈液は最長7日間まで使用できますが汚染度に応じて交換してください。

(推奨:毎日交換)

特長

アルデヒド、塩素フリーで従事者や器具に優しい成分です。

血液が凝固せず除菌と洗浄を同時に行うことができます。

主成分

アルキルアミン、塩化ジアルキルジメチルアンモニウム

抗菌スペクトル

B型・C型肝炎ウイルス、HIVウイルス、結核菌、一般細菌、アデノウイルス
ノロウイルス、ポリオウイルス、インフルエンザウイルス

注意事項

アルミ、樹脂、真鍮素材は劣化するおそれがあります。

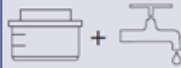

ゴム製品は変色するおそれがあります。

浸漬後は器具が滑るため十分に水洗いしてください。



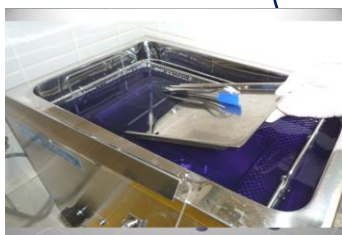
内容量 / 2L

定 価 / 12,600円(税抜)

Dosing		
	+	
Concentrate	Water	Time
2%	20 ml 980 ml	15 分

使用手順

浸漬



超音波洗浄器推奨

水洗い



滅菌

