

大判サイズで厚手で経済的！

触れる前に、ひと拭き

# DIFクロス

/表面清拭用ドライワイプス



さまざまな液体を浸み込ませて使えます（1L推奨）  
※別売り

イソラピッド  
補充用  
2L



デンタル  
ラピッド SD  
リキッド  
5L



材質に優しい洗浄除菌剤

アルコール  
フリー

デンティロゼロ  
1L



優れた除菌力で

細菌やウイルスなどに対して

# 1分で効果を発揮

※対応範囲の詳細はお問い合わせください

# サッと出して、サッと清潔。

ユニット、テーブル、ハンドピース等の  
ドライワイプス



DIF クロス 容器付

標準価格：5,900円

DIF クロス 詰替用

標準価格：4,200円

入数：250 枚入  
寸法 (mm):160×300  
材質：綿、ポリエステル

DIF クロスに含ませて使う  
表面用除菌剤※別売り

イソラピッド 補充用 2L

標準価格：11,800円

デンタルラピッド SD リキッド 5L

標準価格：29,400円



イソラピッド 補充用 2L SD リキッド 5L

初めての方に最適なサイズ

イソラピッド スプレー 1L

標準価格：6,800円

材質に優しい洗浄除菌剤

アルコールフリー デンティロゼロ 1L


標準価格：6,800円



デンティロゼロ 1L


## 使用方法

1

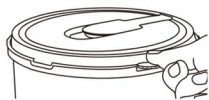


容器の溝にコイン等を差し込んで捻ると蓋が開きます。

2

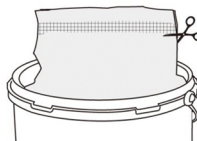


内袋をハサミ等で切り開封します。

3

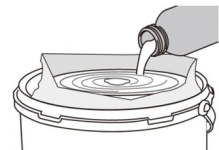

クロスに液体 1Lを注いで浸み込ませます。

4

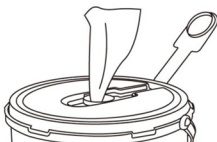

クロスを蓋の取り出し口から引き出してご使用ください。

5



ご使用後は取り出し口の蓋をきちんと閉めてください。



- ・クロスが無くなりましたら詰替用を容器に入れてご使用ください。
- ・本製品は当社製品以外の液体にもご使用できます。・表示価格に消費税は含まれておりません。

佐藤歯材

LINE  
友だち  
募集中



@961vzfs

QRコード



佐藤歯材株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-15-3  
TEL 03-3833-3986 FAX 03-3833-3989  
https://www.satoushizai.co.jp/  
製造元:株式会社橋本クロス

