


2つのシリコンポイントと
ペーストだけの新システム

panther



方法は2ステップによる研磨 と ツヤ出しのみ

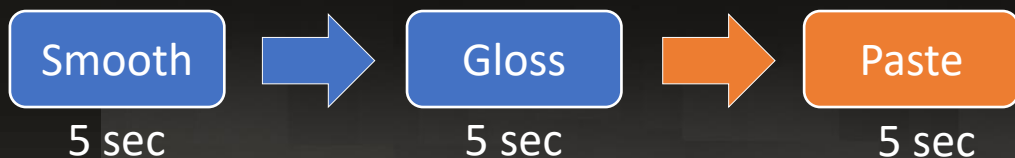

推奨材料はジルコニア、ポーセレン、ニケイ酸リチウム



ジルコニア




ポーセレン




ニケイ酸リチウム

レーザ顕微鏡による研磨後の表面観察

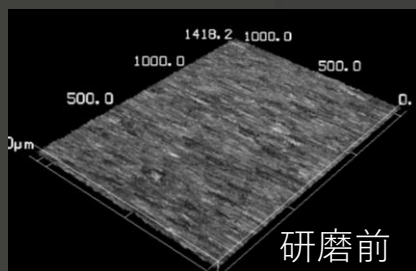

研磨前

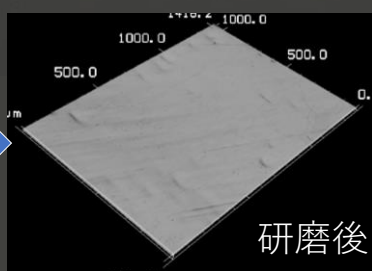


研磨後

滑沢に表面研磨されたジルコニアクラウンはコバルトクロムよりも対合歯の磨耗量が少ないことが報告されています。また滑沢な面にはプラークが付きにくく、口腔内の清潔度を保つことに寄与します。



TCP

Zirkon / Keramik | Zirconium oxide / Ceramic

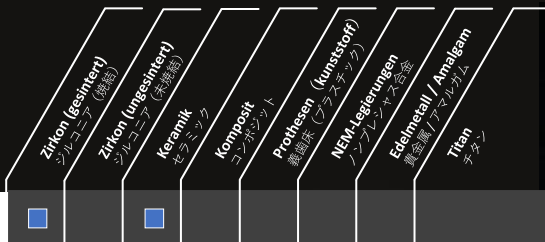

ステップ 1 【仕上げ】 5 sec

TCP ミディアム ポイント 【Smooth】

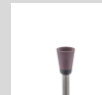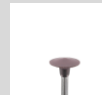HP				RA (CA)			
品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番
TCP100 104M	TCP140 104M	TCP158 104M	TCP541 104M	TCP103 204M	TCP126 204M	TCP143 204M	TCP144 204M
							
Flame 055 φ5.5 × 18mm 12.000/20.000	Lense 260 φ26 × 2mm 8.000/20.000	Wheel 170 φ17 × 2.4mm 8.000/20.000	Lense 150 φ15 × 1mm 8.000/20.000	Flame 044 φ4.4 × 10.5mm 8.000/20.000	Cup 060 φ6 × 8mm 6.000/20.000	Knife-edge 100 φ10mm 6.000/20.000	Lense 100 φ10 × 0.8mm 6.000/20.000
1本入	1本入	1本入	1本入	1本入	1本入	1本入	1本入

ステップ 2 【ツヤ出し】 5 sec

TCP エクストラファイン ポイント 【Gloss】

HP				RA (CA)			
品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番
TCP100 104XF	TCP140 104XF	TCP100 158XF	TCP541 104XF	TCP103 204XF	TCP126 204XF	TCP143 204XF	TCP144 204XF
							
Flame 055 φ5.5 × 18mm 12.000/20.000	Lense 260 φ26 × 2mm 8.000/20.000	Wheel 170 φ17 × 2.4mm 8.000/20.000	Lense 150 φ15 × 1mm 8.000/20.000	Flame 044 φ4.4 × 10.5mm 8.000/20.000	Cup 060 φ6 × 8mm 6.000/20.000	Knife-edge 100 φ10mm 6.000/20.000	Lense 100 φ10 × 0.8mm 6.000/20.000
1本入	1本入	1本入	1本入	1本入	1本入	1本入	1本入

ステップ 3 【光沢研磨】 5 sec

TCP ブリストルポイント / ペースト

HP		DIAMOND
品番	品番	品番
TCP417 104	TCP419 104	TCP 01/20
		
Bristle 170 φ17 12.000/15.000	Bristle 190 φ19 12.000/15.000	Diamond Paste 20G
10本入	10本入	15g

made
in
Germany

SUN Oberflächentechnik GmbH

11/2020

Panther スターターキット

HP
品番
Panther Edition

Smooth x4 / Gloss x4 Bristle x2 / Paste x1
1 set

一般の名称：歯科用研磨器材
販売名：パンサー研磨 KIT
届出番号：13B1X10122000013

製造販売元：佐藤歯材株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-3
TEL：03-3833-3986 FAX：03-3833-3989

記載の仕様および外観は改良のため変更する場合があります。