

06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯肉圧排糸 35861001（JMDNコード）

【 ミュラーオミクロン EAZY CODE 】

【禁忌・禁止】

・〔適用対象〕

本製品の原材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

・本製品を再使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

1. 形状・構造



本製品は、直径の異なる下記の型式がある。

サイズ・型式	色調	長さ
サイズ 000	緑	330 cm
サイズ 00	ブラウン	
サイズ 0	紫	
サイズ 1	青	
サイズ 2	オレンジ	
サイズ 3	黄	

2. 原理

支台歯を形成する際に、歯根と歯肉の間に本製品を圧入することで、歯肉を圧排する。

【使用目的又は効果】

本製品は、支台歯形成、印象採得などの際に、歯肉を圧排するために一時的に用いる。

【使用方法】

- 適切なサイズのコードを選択する。
- 処方に必要な適量のコードを容器から引き出し、圧排器具等を用いて、歯肉溝内に挿入する。
- 圧排が得られた後、コードを除去する。

【保管方法及び有効期間等】

- 使用中の本製品を保管する際は、フタをしっかりと閉じ、専用の容器で保存すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：佐藤歯材株式会社

住所：東京都台東区東上野 1-15-3 佐藤ビル

電話番号：03-3833-3986

製造業者

名称：ミュラーオミクロン有限合資会社

Mu () l l e r - O m i c r o n G m b H

& C o . K G

(国名：ドイツ)