

INSTRUMENT DISINFECTION POWDER

SUN420J サンセプト インストルメントDIFパウダー

耐熱性のない器具の短時間除菌に。

用途

シリコンゴム・プラスチック素材、内視鏡など耐熱性のない器具の除菌洗浄。

特長

- ・耐熱性のない器具の除菌に適しています。
- ・芽胞をはじめ広範囲の微生物に作用します。
- ・アルデヒドフリーで安全性に優れています。
- ・血液などのタンパク汚れが固着しません。
- ・粉末と温水を混ぜるだけで簡単に実用液の調製が可能です。

主成分

炭酸ナトリウム過酸化水素化物、テトラアセチルエチレンジアミン、クエン酸
界面活性剤、防錆剤

作用範囲

芽胞、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVウイルス、結核菌、一般細菌、真菌
アデノウイルス、ノロウイルス、ポリオウイルス、インフルエンザA型ウイルス
コロナウイルス

EN13624、EN13704、EN13727、EN14348、EN14476、EN14561、EN14562、EN14563試験基準に準拠

包装 / 粉末1.5kg、計量スプーン付
定価 / 18,000円

	2%	1%
粉末	20g	10g
温水	980ml	990ml
時間	15分	60分

1L実用液の調製方法と使用手順

希釈



50倍希釈(2%)

蓋付容器に付属の計量スプーン1杯(すり切り20g)と40℃の温水980mlを入れて十分にかき混ぜてください。

100倍希釈(1%)

蓋付容器に付属の計量スプーン1/2杯(10gの線まで)と40℃の温水990mlを入れて十分にかき混ぜてください。

浸漬



使用後の器具を水洗いせずに50倍希釈は15分、100倍希釈は60分浸漬してください。

水洗い



流水下で十分に水洗いしてください。

- 粉末が完全に溶けるまでにかき混ぜてください。●規定時間を超えた浸漬は腐食、劣化、変色する場合がありますので避けてください。
- オールステンレス製以外の金属製品は浸漬しないでください。●超音波洗浄器との併用はしないでください。●希釈液は毎日交換してください。
- 器具によっては素材に影響を及ぼす場合がありますためご使用前に必ず器具の添付文書を確認してください。

※表示価格に消費税は含まれておりません。

ご用命は

佐藤歯材株式会社

東京都台東区東上野1-15-3
TEL.03-3833-3986 FAX.03-3833-3989
www.satoushizai.co.jp
製造元 PRISMAN (ドイツ)