

## ASEPTOPRINT® Spray

# アセプトプリント スプレー

## 印象表面を1分間で除菌洗浄

### 用途

印象体、印象用トレー、バイトワックスの除菌洗浄。

### 特長

- ・多くのウイルス、細菌を1分で素早く除菌します。
- ・アルジネート、シリコン、寒天の各種印象材に使用できます。
- ・寸法精度や面荒れの影響に配慮した成分です。
- ・スプレータイプのため処理が簡便です。

### 使用方法

採得した印象体を血液や唾液等の飛散に注意して水洗い後、印象表面にスプレーしてください。規定時間後は水洗いしてから石膏を注入してください。

### 主成分

イソプロパノール、エタノール、第4級アンモニウム化合物

※アルデヒド、塩素は含んでおりません

### 作用範囲

結核菌、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVウイルス、コロナウイルス、MRSA  
アデノウイルス、一般細菌、インフルエンザA型ウイルス、ポリオウイルス 等

### 注意事項

- ・アルコールに耐性のない材質には使用しないでください。
- ・血液が多く付着している場合はアセプトプリントリキッドを推奨します。
- ・印象材によっては石膏の最適時期が異なりますので印象材メーカーの指示に従ってください。



## アセプトプリントスプレーの使い方



内容量 / 1 L

定 価 / スプレータイプ 6,800円

詰替用 6,600円

表示価格は2024年4月現在の医院価格です。表示価格に消費税は含まれておりません。

佐藤歯材株式会社

東京都台東区東上野1-15-3

TEL.03-3833-3986 FAX.03-3833-3989

www.satoushizai.co.jp

製造元 Oro Clean Chemie AG (スイス)