

OROLIN®MULTISEPT Plus

オロリン マルチセプトプラス 医薬用外劇物

洗浄と除菌が同時に可能

用途

一般器具、外科用器具、インプラント器具などの除菌・洗浄

特長

- ・タンパク質を凝固させずに洗浄と除菌が一度にできます。
- ・多くのウイルス、細菌を15分で素早く除菌します。
- ・50倍に希釈して使用するため経済的です。
- ・最長7日間まで連続使用可能です。
- ・アルデヒド、塩素フリーで従事者や器具に優しい成分です。

使用方法

汚染器具を水洗いせず50倍(2%)希釈液に15分間浸漬してください。

浸漬後は十分に水洗いしてから滅菌してください。

希釈液は最長7日間使用できますが汚染度に応じて早期交換してください。

主成分

アルキルアミン、塩化ジアルキルジメチルアンモニウム

作用範囲

B型・C型肝炎ウイルス、HIVウイルス、結核菌、一般細菌、アデノウイルス
 コロナウイルス、ノロウイルス、ポリオウイルス、インフルエンザウイルス 等

注意事項

規定時間を超過した浸漬は避けてください。

浸漬後は器具が滑るため十分に水洗いしてください。

アルミ、樹脂、真鍮素材は劣化するおそれがあります。

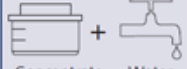

ゴム製品は変色するおそれがあります。



内容量 / 2L

定 価 / 14,800円

表示価格は2024年4月現在の医院価格です。
 表示価格に消費税は含まれておりません。

Dosing		
	+	
Concentrate	Water	Time
2%	20 ml 980 ml	15 分



廃棄方法：希釈液は劇物該当成分の含量が0.4%以下のためそのまま廃棄可能です。
 原液の場合は水で12.5倍以上に希釈してから廃棄してください。