

雲のようにやわらかい

ペットの歯の健康には

やわらかさは雲のように。
すみずみまで届く30度設計で、磨き心地が変わる。
“30度の革命ハブラシ”誕生。



30°形状のネック

30°ネックで、奥歯までラクに磨ける！

コンパクト：奥歯の細かい汚れまでしっかり届く
ワイド：広い歯面を効率的にケア

磨きにくい奥歯や裏側まで届いて、簡単・きれいに。
飼い主さんの負担も少なく、犬猫兼用で毎日の口腔ケアを快適に。



一般の歯ブラシの毛



チカペカ超微細毛

デリケートな歯ぐきを守る、新しいやさしさ


やさしく洗える、超微細毛。

スポンジのように柔らかく、歯ぐきに気持ちいい。

チカペカなら

歯ぐきへの刺激を抑えつつ、歯の表面をしっかりと清潔に。

※一般的な太い毛の歯ブラシは、デリケートな歯ぐきを傷つけることも…。

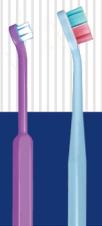

大きめブラシで歯茎マッサージ、小さめブラシで歯磨きという2本使いがおすすめ！



乾燥しにくい
超微細密集毛



乾燥しやすい
チカペカパターン毛

速乾性でいつでも清潔、安心ブラッシング

極細毛は乾きにくく、菌が繁殖しやすい…

でも **チカペカなら安心！**

風通しのよい設計で、すばやく乾き、清潔をキープ。



雲のようにやわらかく すみずみまですつきりと CHICAPETCAの使い方

これなら柔らかくて痛くないし
気持ちいいワン!



毎日きれいに

チカペカ歯ブラシの使い方

1. 歯磨きが必要な歯と歯ぐきを一緒にマッサージするように丸く転がしながら磨いてください。
2. 歯と歯ぐきの境界に歯ブラシを当て、前後方向に軽く揺らしてマッサージしてください。




使い方と同じくらい重要な

チカペカ歯ブラシの乾燥方法

1. 歯磨きを終えた歯ブラシをきれいな水で洗ってください。
2. 風通しの良い場所で乾かしてください。完全に乾燥させた状態を維持し、細菌の増殖を防いでください。



30°ネックで
奥歯までラクに届く!

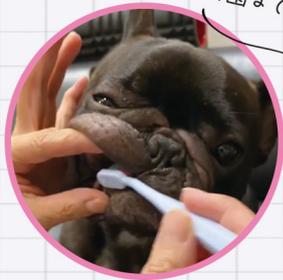

FAQ

Q. どうやって保管すればいいですか?

使用後はよく洗い、風通しの良い場所で乾燥させて保管してください。

Q. どのくらいの頻度で歯みがきすればいいですか?

やわらかい毛を使って、毎日歯ぐきをマッサージするように優しく磨いてあげましょう。

Q. 交換の目安はどれくらいですか?

使用頻度や習慣にもよりますが1~2カ月に一度の交換をおすすめしています。

Q. 歯ぐきから血が出るようです。

歯ぐきがかかなり弱っている証拠です。病院へ一度受診されることをおすすめします。やさしく歯ぐきマッサージを続けると、歯ぐきが強くなります。

使い方動画



ボクのハミガキ
動画だよ!



ペット用歯ブラシ コンパクト
パープル・ホワイト
患者価格 1,000円 定価 800円

ペット用歯ブラシ ワイド
ブルー
患者価格 1,250円 定価 1,000円

佐藤歯材

LINE
友だち
募集中



@961vzfis

QRコード



佐藤歯材株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-15-3
TEL 03-3833-3986 FAX 03-3833-3989
<https://www.satoushizai.co.jp/>

